

Tiiviiden merkitys

Kertakäyttöiset hengityssuojaimet toimivat tehokkaasti vain silloin, kun kasvojen ja suojaimen reunojen väli on tiivis. Suojain on asetettava tiiviisti kasvoille, jotta suojaimeen ei pääse epäpuhtauksia sisältävää ilmaa.

Näitä sovitusohjeita tulee noudattaa aina, kun 3M™ Aura™ 06910+Gen3, 06923+Gen3 ja 06933+Gen3 hiukkassuojaimet.



Käyttäjän parran tulee olla ajettu ennen suojaimen käyttöä. Hengityssuojaimia ei pitäisi käyttää sängyn, parran tai muun kasvojen karvoituksen kanssa, koska ne voivat estää riittävän tiiviiden.



1. Muotoile suojain kupinmuotoiseksi pitämällä suojainta nurja puoli ylöspäin ja erota ylä- ja alaosa toisistaan leukaliuskan avulla.



2. Vedä leuka- ja nenäpaneeliliuskoja, kunnes nenäkappale taipuu sen verran, että hengityssuojain muotoutuu kuppimaiseksi. Tarkista, että molemmat paneelit avautuvat kokonaan.



5. Tartu toisella kädellä molempiin nauhoihin. Pidä hengityksensuojainta leukasi alapuolella nenäpuristin ylöspäin ja vedä nauhat pääsi yli.
6. Aseta ylänauha päälleen ympäri ja alannauha korvien alapuolelle. Nauhat eivät saa jäädä kierteelle. Säädä ylä- ja alaosa istumaan mukavasti. Varmista, että paneelit eivät ole taitettuina ja liuskat on levitetty tasaisiksi.

Muotoile nenäkappale molemmiin käsiin nenänvarren muodon mukaiseksi tiiviin istuvuuden aikaansaamiseksi

Tarkista, että molemmat paneelit avautuvat kokonaan ja liuskat on levitetty tasaisiksi

Hengityssuojain tulisi asettaa oikeaan asentoon kasvoille tartuntaventtiilin avulla ja/tai säätämällä ylä- ja alapaneelleja liuskojen avulla



3. Pidä kiinni liuskoista ja pitele samalla hengityssuojainta avoin puoli kasvojen suuntaisesti ja aseta se kasvoille.



7. Varmista hyvä istuvuus ja asianmukainen tiiviyden muokkaamalla molempien käsien avulla nenäkappaletta nenän muodolle sopivaksi. Jos puristat nenäkappaletta vain yhdellä kädellä, hengityksensuojaimen teho saattaa jäädä heikommaksi. Käytä molempia käsiä.



4a. ULOSHENGITYSVENTTIILILLÄ varustettu hengityssuojain – kun hengityssuojain on kasvoillasi tarkasta tiiviyden peittämällä hengityksensuojain edestä molemmiin käsiin varoen liikuttamasta suojainta.

4b. ILMAN ULOSHENGITYSVENTTIILIÄ oleva hengityssuojain – ota hengityssuojain yhteen käteen avoin puoli kasvosi päin.



8. Hengityssuojaimen kasvotiivisteiden tiiviyden ja istuvuuden tulisi tarkistaa ennen työpaikalle menemistä.

Tiiviiden tarkistamistoimet

1. Tarkasta tiiviyden peittämällä hengityksensuojain edestä molemmiin käsiin varoen liikuttamasta suojainta, jotta sen tiiviyden ei kärsi.
- 2a. VENTTIILITÖN hengityssuojain – HENGITÄ ULOSPÄIN terävästi
- 2b. ULOSHENGITYSVENTTIILILLÄ varustettu hengityssuojain – HENGITÄ SISÄÄNPÄIN terävästi.
3. Jos nenän kohdalla esiintyy ilmavuotoa, korjaa nenäpuristimen asentoa tiiviyden saavuttamiseksi. Toista edellä kuvattu tiiviyden tarkistus.
4. Mikäli ilmaa vuotaa hengityssuojaimen reunoilta, säädä nauhojen kireyttä poistaaksesi vuodon. Toista tiiviydtestä.

Jos ET pysty saavuttamaan riittävää tiiviyttä, ÄLÄ mene epäpuhtauksia sisältävälle alueelle. Ilmoita esimiehellesi.

3M Automotive Aftermarket Division

Suomen 3M Oy
Työsuojelutuotteet
Keilaranta 6
02150 Espoo
Puhelin +35 8942413045
3M.CustomerCare.FI@mmm.com
www.3M.fi/Autotuotteet/AuraGen3

Kierrätä. Painettu Isossa-Britanniassa. 3M ja Aura ovat 3M Companyn tavaramerkkejä. © 3M 2018. Kaikki oikeudet pidätetään. J430960